


KIT PARA COLETA E ENVIO DE AMOSTRAS PARA SEXAGEM DE AVES

Identificação do solicitante

Nome completo: _____ CPF/CNPJ: _____
 E-mail: _____ Telefone: _____
 Endereço completo: _____

Identificação do animal

Nome ou anilha: _____
 Raça: _____
 Idade: _____

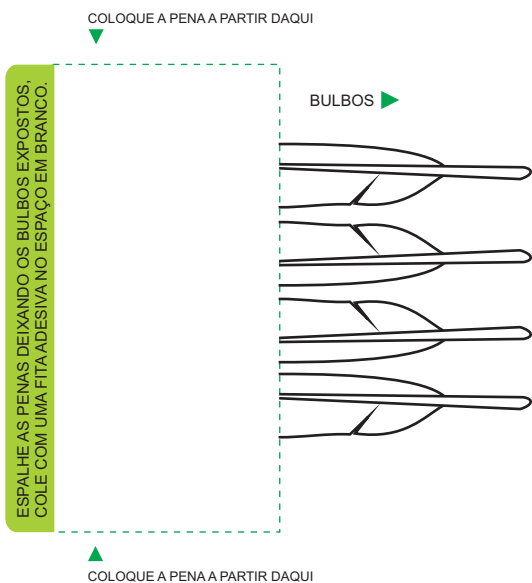

INSTRUÇÕES PARA COLETA DE PENAS

- *Preferencialmente escolha penas em crescimento
- *Colete as penas:

Pena Seca (sem sangue no bulbo):

- Em passeriformes: colete aproximadamente 15 penas do peito.
- Em psitacídeos: colete de 9 a 12 penas do peito.
- Em avestruzes ou emas: colete 6 plumas do peito ou da base do pescoço.
- *Em seguida, fixe as penas no adesivo e lacre o kit.
- *Quando fixar as penas, procure espalhá-las o máximo possível, evitando que fiquem amontoadas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Preencha corretamente todos os dados solicitados no kit. Caso contrário, as amostras poderão sofrer atraso de processamento no laboratório;
- Lave bem as mãos antes de coletar;
- Não tocar os bulbos ou sangue após a colheita, a fim de evitar a contaminação do DNA;
- Envie o(s) kit(s) em no máximo 5 dias após a colheita;
- Em caso de dúvidas, entre em contato conosco antes de realizar a colheita;
- Se o material coletado não apresentar a qualidade ou quantidade de DNA suficiente para a realização do exame, será solicitada uma nova colheita.

INSTRUÇÕES PARA COLHEITA DE SANGUE

- *Corte um pedacinho da unha do pássaro;
- *Espere alguns segundos até aparecer o sangue;
- *Pingue 2 ou mais gotas no local indicado;
- *Espere o sangue secar completamente (10 a 20 min) antes de fechar o kit.

Armazenamento e envio:

- 1º passo: Dobrar a parte inferior da folha para cima.
- 2º passo: Dobrar a parte superior da folha para baixo.
- 3º passo: colocar a folha com o material coletado no envelope e enviar ao laboratório em até 5 dias.

